

## Scarmed® Gel siliconic pentru cicatrice

### Descriere:

**Scarmed®** este un gel pe bază de silicion, nu este lipicios și se usucă rapid, și este utilizat pentru tratamentul cicatricilor recente și vechi.

**Scarmed®Gel** poate fi utilizat pe toate zonele corpului, inclusiv pe față și gât.

Când utilizați **Scarmed®Gel** conform instrucțiunilor, acesta se usucă și formează un strat transparent, protector și impermeabil.

### Indicații:

- **Scarmed®Gel** protejează rănila de acțiunea nocivă a substanțelor microbiene și chimice, și ajută rana să se vindece în mod natural, fără a lăsa cicatrici vizibile.
- **Scarmed®Gel** ameliorează mâncărimea și inconveniente cauzate de cicatrici și, de asemenea, reduce roșeața și diferențele de culoare asociate cicatricilor.
- Tipurile de cicatrici care pot fi tratate cu **Scarmed®Gel** sunt : cicatrici după operații și proceduri chirurgicale, cicatrici după răni vechi, cicatrici cauzate de arsuri, acnee și alte boli ale pielii.
- **Scarmed®Gel** poate fi utilizat la toți pacienții, inclusiv la copii și la persoanele cu piele sensibilă.

**Ingrediente:** Dimethicone, Dimethiconol, Cyclopentasiloxane, Cetyl Dimethicone.

**Mod de utilizare:** Spălați zona afectată și uscați-o. Aplicați o cantitate mică de **Scarmed®Gel** și masați ușor. Aplicați **Scarmed®Gel** de două ori pe zi (o dată dimineața și o dată la culcare).

**Mod de prezentare:** **Scarmed® gel** este disponibilă în tub 15 g.

**Modul de păstrare:** A se păstra la temperaturi sub 30°C.

### Atenționări:

1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2. Doar pentru uz extern.
3. Evitați contactul cu ochii.
4. A nu se folosi pe răni deschise.
5. A nu se folosi dacă sigiliul sau tubul este stricat și/sau deteriorat.